

GUIDA RAPIDA CONNESSIONE
AUDIO/TV

SURFLINK

MOBILE





Soluzione 1 - TV con interfaccia Bluetooth integrata: connessione diretta modalità stereo tramite accoppiamento Bluetooth da SurfLink Mobile

Soluzione 2 - TV: utilizzare presa cuffia TV che non disattivi gli altoparlanti

Inserire trasmettitore Bluetooth (accessorio) connessione diretta modalità stereo (vedi soluzione 1)



Accessorio non in dotazione



Adattatore SCART RCA opzionale

Soluzione 4 - Collegamento a SCART - TV: impostata su OUT

Inserire adattatore SCART > RCA (opzionale) impostato su OUT: utilizzare opzioni di connessione **a** o **b** della **Soluzione 3**

Soluzione 5 - IN ASSENZA di qualsiasi tipo di collegamento: utilizzare SurfLink Mobile posizionato davanti agli altoparlanti TV con impostazione microfono FOCUS



Soluzione 3 - Collegamento RCA (USCITA - OUT) - TV



Cavo opzionale

OPZIONE a: Connessione diretta con cavo opzionale e con ripetitore Bluetooth opzionale stereo (vedi soluzione 1)

OPZIONE b: Connessione con cavo opzionale più cavo in dotazione per connessione stereo



Cavo in dotazione



IMPORTANTE: Tramite le connessioni 1, 2, 3a, 4a, 5 SurfLink Mobile funzionerà in modalità stereo e potrà rimanere in carica. Con connessione 3b e 4b non potrà ricaricarsi e funzionerà in modalità stereo.

NOTA: "Fare sempre riferimento al manuale del televisore dove indica la presa in USCITA"